

## **Augen-/Konjunktivalabstrich**

### **Entnahmetechnik**

Da Lokalanästhetika antimikrobielle Substanzen enthalten können, sollte der Abstrich vor der Anästhesierung gewonnen werden.

Mit dem angefeuchteten (sterile Kochsalzlösung) Abstrichtupfer die Konjunktiva/den Bindehautsack unter leichtem Druck abstrichen.

### **Volumen/Probenzahl**

- Abstrichtupfer mit Gelmedium: kultureller Nachweis von Entzündungs-/Eitererreger
- Abstrichtupfer ohne Gelmedium: für PCR-Untersuchungen (zum Beispiel Chlamydien, Acanthamoeben)

### **Lagerung und Transport**

- Abstrichtupfer mit Gelmedium: Bei Transportzeit < 2 Stunden: Raumtemperatur, ansonsten Lagerung bis 24 Stunden bei Raumtemperatur
- Abstrichtupfer ohne Gelmedium: Bei Transportzeit < 2 Stunden: Raumtemperatur, ansonsten Lagerung bis 24 Stunden bei 2-8°C (Kühlschrank)

### **Bemerkungen**

entfällt