

## **Katheterspitzen**

### **Entnahmetechnik**

Sorgfältige Desinfektion der Haut an der Durchtrittsstelle, Entfernen des Katheters unter aseptischen Kautelen. Mit steriler Schere/Skalpell das distale Ende (2-3 cm) abschneiden und in ein steriles Gefäß einbringen.

### **Volumen/Probenzahl**

---

### **Lagerung und Transport**

Transportzeit maximal 2 Stunden bei Raumtemperatur

### **Bemerkungen**

Die mikrobiologische Untersuchung von Blasen katheterspitzen ist nicht sinnvoll.