

Rachen-/Tonsillenabstrich

Entnahmetechnik

Zunge mit Spatel herunterdrücken, mit einem angefeuchteten (sterile NaCl-Lösung) Abstrichtupfer entzündete Bereiche der Tonsillen oder Rachenwand abstreichen. Aus Tonsillarkrypten Material vorsichtig unter drehenden Bewegungen entnehmen. Zur Vermeidung der Kontamination mit physiologischer Standortflora muss die Berührung anderer Schleimhäute sowie der Kontakt mit Speichel vermieden werden.

Volumen/Probenzahl

- Kultureller Nachweis von Entzündungs-/Eitererreger, Pilze: Abstrichtupfer mit Gelmedium
- PCR Untersuchungen: Abstrichtupfer ohne Gelmedium

Lagerung und Transport

- Abstrichtupfer mit Gelmedium: Bei Transportzeit < 2 Stunden: Raumtemperatur, ansonsten Lagerung bis 24 Stunden bei Raumtemperatur
- Abstrichtupfer ohne Gelmedium: Bei Transportzeit < 2 Stunden: Raumtemperatur, ansonsten Lagerung bis 24 Stunden bei 2-8°C (Kühlschrank)

Bemerkungen

entfällt